

StickOff®

Spray 50 ml

Spis treści:

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?
2. Skład
3. Ważne informacje przed zastosowaniem
4. Jak stosować **StickOff®**
5. Możliwe działania niepożądane
6. Jak przechowywać **StickOff®**/ ostrzeżenia
7. Pozostałe informacje

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?

Wyrób medyczny **StickOff®** to spray ułatwiający usuwanie i służący do redukcji bólu towarzyszącego usuwaniu wszelkiego rodzaju plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących, m.in.

- włókninowych,
- wodoodpornych,
- kinesiotalingowych,
- nikotynowych,
- hormonalnych.

Wyrób medyczny **StickOff®** przeznaczony jest noworodków, dzieci i dorosłych.

StickOff®:

- ✓ całkowicie usuwa klej ze skóry
- ✓ nie zawiera alkoholu,
- ✓ nie wysusza i nie podrażnia skóry.

StickOff®:

- ✓ szybko wysycha,
- ✓ pozostawia skórę gotową na zastosowanie kolejnego opatrunku.

StickOff®:

- ✓ jest łatwy w użyciu,
- ✓ aplikacja możliwa pod dowolnym kątem,
- ✓ doskonały do stosowania w trudno dostępnych miejscach.

2. Skład

Heksametylodisiloksan.

3. Ważne informacje przed zastosowaniem

Przeciwwskazania

Wyrobu **StickOff®** nie należy stosować, jeżeli:

- opakowanie jest uszkodzone,
- po upływie daty ważności,
- w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na składnik wyrobu.

Środki ostrożności

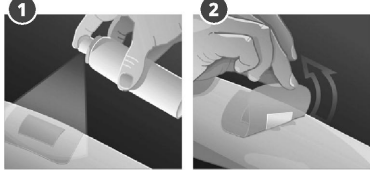
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu, skórę spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Stosować w pomieszczeniach wentylowanych, nie wdychać rozpylonego wyrobu.

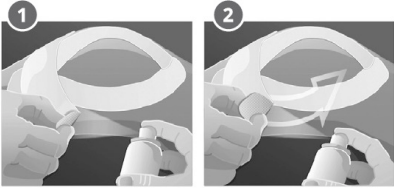
Nie stosować bezpośrednio na oczy. W przypadku dostania się wyrobu medycznego **StickOff®** do oczu, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.

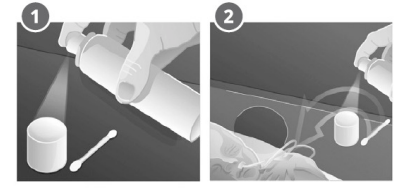
Nie połykać wyrobu medycznego **StickOff®**. Przy połknięciu NIE wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać wodą usta. W przypadku pojawienia się objawów zatrucia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Jak stosować StickOff®

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Opatrunki na włókninie	
<ol style="list-style-type: none">1. Nanieść preparat na przyklejony plaster lub przylepić i odczekać kilka sekund, aż powierzchnia plastra będzie wilgotna.2. Delikatnie usunąć opatrunek. W zależności od potrzeb, w przypadku mocno przyklejonego plastra powtórzyć aplikację.	

Piastry wodoodporne, kinesiotaping, plastry nikotynowe, hormonalne, rozgrzewające i inne	
<ul style="list-style-type: none">• Odkleić róg plastra i nanieść preparat między plaster a skórę (rys 1).• Następnie delikatnie odklejać plaster, aplikując jednocześnie preparat (rys 2).	

U noworodków lub w okolicach oczu	
<ul style="list-style-type: none">• Zaaplikować niewielką ilość wyrobu do nasadki pojemnika (rys 1).• Zamoczyć patyczek higieniczny w preparacie i nanieść go na opatrunek (włókninowy) lub pod niego (wodoodporny) (rys. 2). Odczekać kilka sekund i delikatnie usunąć opatrunek	

Preparat wysycha bardzo szybko, nie utrudniając przyklejenia kolejnego plastra/ przylepca. Może być stosowany również do usuwania ze skóry starych pozostałości kleju. Wyrób medyczny **StickOff®** stosować tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją używania. Stosować w miarę potrzeb. **Aplikacja wyrobu medycznego u dzieci powinna odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.**

5. Możliwe działania niepożądane

Wyrób medyczny **StickOff®** jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

6. Jak przechowywać StickOff®/ ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłubać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
- Unikać uwolnienia do środowiska - po zużyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Chronić przed dziećmi.

Data ważności i nr serii znajdują się na spodzie opakowania i na kartoniku.

7. Pozostałe informacje

StickOff® to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie: Pojemnik wielodawkowy o objętości 50 ml netto, zawierający 160 pojedynczych dawek. Pojemnik jest pod ciśnieniem.

Producent: EmergoPharm Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Józefa Piłsudskiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Dystrybutor w Polsce: Chiesi Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79
e-mail: info-pl@chiesi.com


Wyjaśnienie zastosowanych symboli


Znak zgodności CE 


Producent 


Numer serii 

Zużyć przed końcem 

Opakowanie aerosolowe – produkt spełnia wszelkie polskie i europejskie wymagania 

Materiały z włókien celulozy, zdatne do recyklingu i biodegradowalne – inny papier, mieszany, tektura 

Wykonano z aluminium 

Skrajnie łatwopalny aerosol 

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 10.2022
10.2022A_PL_IFU